

ECG
247
Heart Sensor

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA
MODEL 353010

1

Pobierz i zainstaluj aplikację ECG247 na swoim telefonie komórkowym



2

Kliknij w link w wiadomości SMS wysłanej przez lekarza lub otwórz aplikację i stosuj się do wyświetlanych instrukcji



3

Wprowadź swoje dane osobowe do aplikacji



4

Umieść czujnik na elektrodzie



Nie zdejmuj zielonej folii z baterii

Obróć w prawo

5


Podłącz czujnik do telefonu



Przyciśnij czujnik pośrodku i trzymaj aż do zapalenia się niebieskiej lampki

6


Oczyść skórę

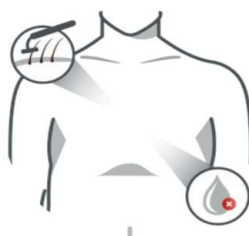

Wyczyść i wysusz skórę.
Usuń owłosienie

7

Zamocuj czujnik na mostku w jego górnej części

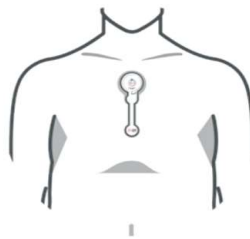

Zdejmij papier ochronny

8

Rozpocznie się proces rejestracji i analizy rytmu serca



Możesz teraz korzystać z telefonu komórkowego normalnie, ale upewnij się, że w czasie badania znajduje się on w pobliżu produktu

9

Używaj czujnika przez przynajmniej 3 dni. Aby zakończyć badanie, wciśnij przycisk „Zakończ badanie”

Zakończ badanie

10

Zamów analizę wyników badania u naszych specjalistów lub udostępniij wyniki swojemu lekarzowi



Zamów nowe czujniki i elektrody na ECG247.pl

PRYWATNOŚĆ Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chronimy Twoje dane i nie udostępniamy Twoich informacji. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na ecg247.com.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sygnały kardiologiczne mają u każdego pacjenta inne kształty i rozmiary. Nie możemy zagwarantować, że w badaniu przeprowadzonym na każdym pacjencie zostaną wykryte wszystkie zaburzenia rytmu. Czujnik nie potrafi identyfikować objawów zawału mięśnia sercowego. Wszelkie zaburzenia rytmu muszą być każdorazowo potwierdzone przez lekarza. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na ecg247.com.

W przypadku występowania jakichkolwiek objawów kardiologicznych skontaktuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE Czujnika nie powinno stosować się u dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów ze znaczną nadwagą (wskaznik BMI >40), pacjentów z kardioverterem-defibrylatorem i w sytuacjach wymagających użycia zewnętrznego defibrylatora. Jeśli stosowanie czujnika prowadzi do wystąpienia swędzenia lub wysypki, należy go zdjąć. Nie polykać produktu. Czujnik należy trzymać z dala od dzieci. Bateria produktu nie nadaje się do ponownego ładowania.

SRODOWISKO Aby zapewnić odpowiedni proces recyklingu, wyjmij baterię z elektrody.

Z założonym czujnikiem można brać prysznic, ale należy unikać kąpienia się w wannie.

Pełna instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej ECG247.pl



Made in Norway
AppSens AS
Senserveien 3D
4790 Lillecaud, Norway
www.ecg247.com

Art. 23346 / Rev. 02/2020